


Daumenverband



Benötigtes Material

- Glasfaserfreier Cast, 2,5 cm
(Delta-Cast® Conformable)
- Kohäsive Fixierbinde, 6 cm breit
(Gazofix®/Gazofix® color)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe

Daumenverband

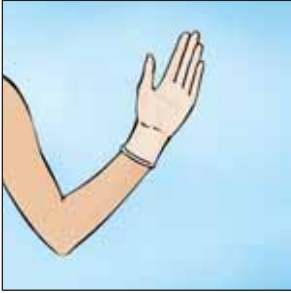


- Untersuchungshandschuh an der betroffenen Hand des Patienten anziehen



- Binde anwickeln (halb überlappend)
- von der Daumenspitze bis in die Handinnenfläche (Handinnenfläche muss komplett abgedeckt sein)



- Ausmodellieren der Handinnenfläche

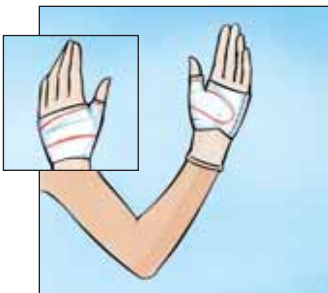

- Aufzeichnen der Schnittlinien



- Aufschneiden des Verbandes entlang des kleinen Fingers (ulnarseitig)



- Entfernen des Verbandes von der Hand
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)



- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde