

Unterarmverband mit Zweifingereinschluss DII/DIII



Benötigtes Material

- Frotteeschlauch
(Artiflex® softliner/Delta Terry-Net® S)


- Glasfaserfreier Cast, 5 cm
(Delta-Cast® Conformable)

- Kohäsive Fixierbinde, 6 cm breit
(Gazofix®/Gazofix® color)


- Aufschneidhilfe
(z. B. Röntgenfilmstreifen)

- Delta-Cast® Spezialhandschuhe

Unterarmverband mit Zweifingereinschluss DII/DIII

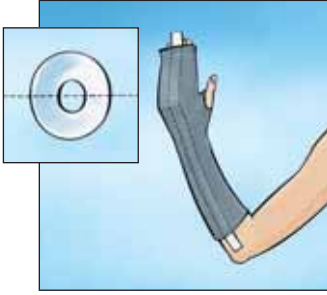

- Anlegen des Frotteeschlauches (faltenfrei)
 - von den Fingerspitzen bis zur Ellenbeuge (distal-proximal)
- Aufschneidhilfe einlegen (auf dem Handrücken bis Unterarm)
- Prominente Körperstellen abpolstern oder freischneiden
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe anziehen

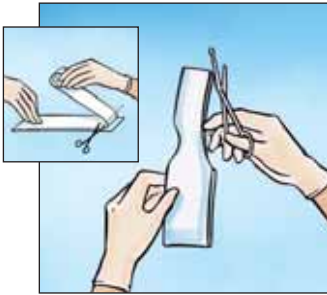

- Longette fertigen (zweilagig)
 - Länge: Mitte Langfinger DII/DIII bis Handbreit über Handgelenk (distal-proximal)
- Zurechtschneiden der Longette im Fingerbereich (auf Breite der zu schienenden zwei Finger)




- Anlegen der Longette



- Binde anwickeln (halb überlappend)
 - von den Fingerspitzen über die Handinnenfläche bis Hälfte Unterarmlänge (distal-proximal) – dabei auf korrekte Intrinsic-Plus-Stellung achten




- Aufzeichnen der Schnittlinien

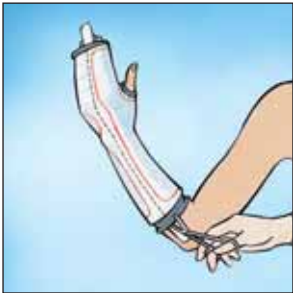

- Aufschneiden des Verbandes (entlang der Aufschneidhilfe)
- * Beachte: Prozessus ulnarseitig freischneiden!



- Entfernen des Verbandes vom Arm
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)

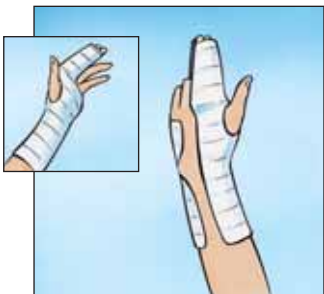

- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde