

Oberarmbrace



Benötigtes Material

- Frotteeschlauch
(Artiflex® softliner/Delta Terry-Net® S)
- Glasfaserfreier Cast, 7,5 cm
(Delta-Cast® Conformable)
- Kohäsive Fixierbinde, 6 cm breit
(Gazofix®/Gazofix® color)
- Aufschneidhilfe
(z. B. Röntgenfilmstreifen)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe

Grundsätzliches


- Möglichst den Verband zu zweit anlegen
- Den Arm auf Zug (Extension) halten
- Nach dem Anwickeln Oberarm an den Körper heranführen und Schulterkappe anmodellieren

Vor dem Entfernen Arm wieder unter Zug (Extension) halten

Oberarmbrace




- Anlegen des Frotteeschlauches (faltenfrei)
 - von Mitte Unterarm bis über die Schulter (distal-proximal)
- Aufschneidhilfe einlegen (Innenseite Unterarm/volar bis zur Schulter)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe anziehen

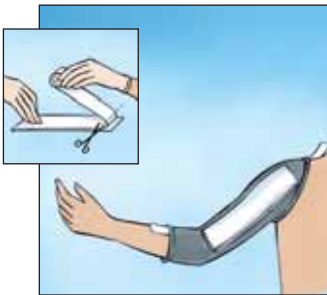

- Longette fertigen (drei- bis vierlagig)
 - Länge: Ellenbeuge bis Schulter
- Anlegen am Oberarm (lateral)



- Binde anwickeln (halb überlappend)
 - vom Ellenbogengelenk bis über die Schulter (distal-proximal)

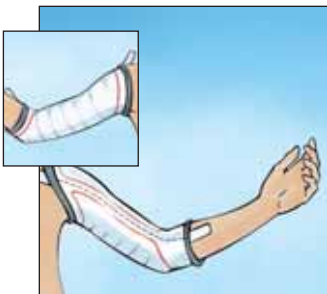

- Aufzeichnen der Schnittlinien



- Aufschneiden des Verbandes (entlang der Aufschneidhilfe)



- Entfernen des Verbandes vom Arm
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)



- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde