

Großzehenverband




Benötigtes Material

- Frotteeschlauch
(Artiflex® softliner/Delta Terry-Net® S)
- Glasfaserfreier Cast, 5 cm
(Delta-Cast® Conformable)
- Kohäsive Fixierbinde, 6 cm breit
(Gazofix®/Gazofix® color)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe

Großzehenverband



- Anlegen des Frotteeschlauches (faltenfrei) von den Zehenspitzen bis zum Sprunggelenk (distal-proximal)
- Aufschneidhilfe einlegen (entlang des Fußsohlenaußenrandes)
 - Beachte: Aufschneidhilfe an der Ferse aus dem Frotteeschlauch herausführen
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe anziehen

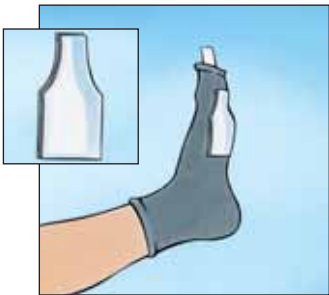

- Longette anfertigen (dreilagig)
 - Länge: von Mitte Großzehen bis zwei Fingerbreit über das Großzehengrundgelenk
- Anlegen am Großzeheninnenrand



- Binde anwickeln (halb überlappend)
 - von Zehenspitzen bis zur Ferse (distal-proximal)



- Aufzeichnen der Schnittlinien



- Aufschneiden des Verbandes (entlang der Aufschneidhilfe)



- Entfernen des Verbandes vom Fuß
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)



- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde