

## Castschuh niedrig



## Benötigtes Material

- Frotteeschlauch  
(Artiflex® softliner/Delta Terry-Net® S),  
2,5-fache Fußlänge
- Glasfaserfreier Cast, 7,5 cm  
(Delta-Cast® Conformable)
- Kohäsive Fixierbinde, 6 cm breit  
(Gazofix®/Gazofix® color)
- Aufschneidhilfe  
(z. B. Röntgenfilmstreifen)
- Klebevlies (Delta Terry-Net® Schaum-  
oder Filzpolster)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe


## Castschuh niedrig



- Anlegen des Frotteeschlauches (faltenfrei)
  - von Zehenspitzen bis Mitte Wade (distal-proximal)
- Aufschneidhilfe einlegen (entlang der Schienbeinkante/Tibia)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe anziehen



- Aufkleben des Klebevlieses (an der Fußsohle/plantar)
- Abdecken des Fußinnen- und Außenrandes

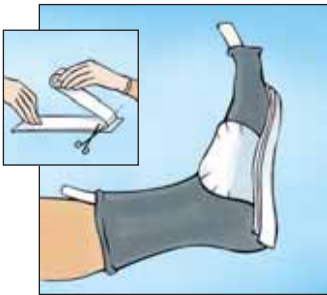

- Longette fertigen (drei- bis vierlagig)
  - Länge: Zehengrundgelenke bis über Ferse
- Anlegen an der Fußsohle (plantar)



- Binde anwickeln (halb überlappend)
  - von Zehenspitzen bis zum Wadenmuskelansatz (distal-proximal)



- Aufzeichnen der Schnittlinien



- Aufschneiden des Verbandes (entlang der Aufschneidhilfe)



- Entfernen des Verbandes vom Fuß
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)



- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde