

Castschuh mit Sprunggelenk- einschluss (nur bei MFk V-Fraktur)



Benötigtes Material

- Frotteeschlauch
(Artiflex® softliner/Delta Terry-Net® S),
2,5-fache Fußlänge
- Glasfaserfreier Cast, 7,5 cm
(Delta-Cast® Conformable)
- Kohäsive Fixierbinde, 6 cm breit
(Gazofix®/Gazofix® color)
- Aufschneidhilfe
(z. B. Röntgenfilmstreifen)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe

Castschuh mit Sprunggelenkeinschluss (nur bei MfK V-Fraktur)



- Anlegen des Frotteeschlauches (faltenfrei)
 - von den Zehenspitzen bis zur Wadenmitte
- Aufschneidhilfe einlegen (entlang der Schienbeinkante/Tibia)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe anziehen



- Aufkleben der Klebevliese
 - Polster in U-Form: an der Sprunggelenkaußenseite
 - Polster in J-Form: an der Sprunggelenkinnenseite
 - Polster in Schmetterlingsform: an der Fußsohle/plantar
- Abdecken des Fußinnen- und Außenrandes



- Longette fertigen (dreilagig)
 - Länge: Großzehengrundgelenk (dreilagig) bis über Ferse (zweilagig), (distal-proximal)
- Anlegen an der Fußsohle (plantar)



- Binde anwickeln (halb überlappend)
 - von den Zehenspitzen bis zur Wadenmitte (distal-proximal)



- Aufzeichnen der Schnittlinien



- Aufschneiden des Verbandes (entlang der Aufschneidhilfe)



- Entfernen des Verbandes
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)



- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde