

Tutor




Benötigtes Material

- Frotteeschlauch
(Artiflex® softliner/Delta Terry-Net® S)
- Glasfaserfreier Cast, 10 cm oder 12,5 cm
(Delta-Cast® Conformable)
- Kohäsive Fixierbinde, 8 cm breit
(Gazofix®/Gazofix® color)
- Aufschneidhilfe
(z. B. Röntgenfilmstreifen)
- Klebevlies, ca. 10 cm x 20 cm
(Delta Terry-Net® Schaum- oder
Filzpolster)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe


Tutor



- Anlegen des Frotteeschlauches (faltenfrei)
 - vom Sprunggelenk bis zur Leiste
- Aufschneidhilfe einlegen (über Schienbeinkante/Tibia und Kniescheibe/Patella bis über den Oberschenkel)
- Delta-Cast® Spezialhandschuhe anziehen

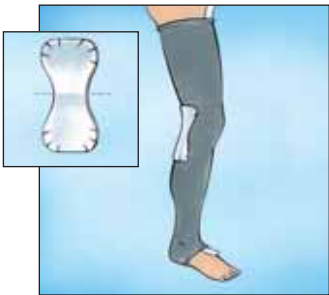

- Aufkleben des Klebevlieses in der Kniekehle (bei Bedarf auch Polsterung des Fibulaköpfchens)

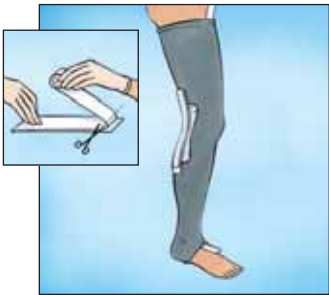

- Longette fertigen (zweilagig)
 - Länge: Mitte Oberschenkel bis Mitte Wade
- Einlegen in der Kniekehle



- Binde anwickeln (halb überlappend)
 - Zwei bis drei Fingerbreit oberhalb des Sprunggelenkes über den Oberschenkel bis zur Leiste (distal-proximal)




- Aufzeichnen der Schnittlinien



- Aufschneiden des Verbandes (entlang der Aufschneidhilfe)



- Entfernen des Verbandes
- Zurechtschneiden des Verbandes (passgenau: siehe Schnittlinien)

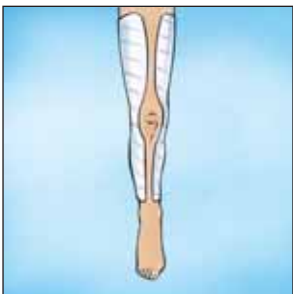

- Passformkontrolle durchführen
- Fixieren mit kohäsiver Binde