

# Daumenschiene (einfach)

## Dorsoradiale Daumenschiene

### Benötigtes Material


- **Dynacast® Prelude:**
  - Meterware 5 cm/7,5 cm/10 cm
  - Vorgeschnitten 7,5 x 30 cm/10 x 30 cm
- Fixierbinde:
  - Elastomull haft/haft color: 6 cm/8 cm Breite
  - Idealbinde BSN/color: 6 cm/8 cm Breite
- Schere
- Maßband oder Mullbinde (unelastisch)
- Sprühflasche mit Wasser (ca. 20 °C)



### Schritt 1

- Gewünschte Länge von der Daumenspitze bis ca. 2 Fingerbreit vor der Ellenbeugefalte abmessen und von der Rolle abschneiden

*(Folienverpackung wieder gut verschließen)*

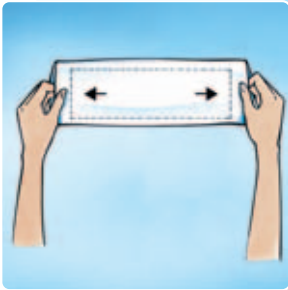

### Schritt 2

- Strecken des Polstermaterials (beidseitig) zur Überdeckung der Schnittkanten



### Schritt 3

Nach Öffnen der Polsterung:

- Schnittkanten (Enden) des Glasfaserkerns leicht abrunden
- Glasfaserkern einsprühen
- Verschließen der Polsterung



### Schritt 4

- An der Daumenspitze beginnend die Schiene auflegen



### Schritt 5

- Anwickeln, anmodellieren und Stellungskorrektur

**Fertig!**

