

Daumenschlinge (einfach)

2,5 cm breite Schiene


Benötigtes Material

- **Dynacast® Prelude:**
 - Meterware 2,5 cm
- Fixierbinde:
 - Elastomull haft: 4 cm Breite
 - Idealbinde BSN/color: 4 cm Breite
- Schere
- Maßband oder Mullbinde (unelastisch)
- Sprühflasche mit Wasser (ca. 20 °C)




Schritt 1

- Gewünschte Länge in einer 8er-Figur am Handgelenk beginnend um den Daumen herum abmessen
(Folienverpackung wieder gut verschließen)

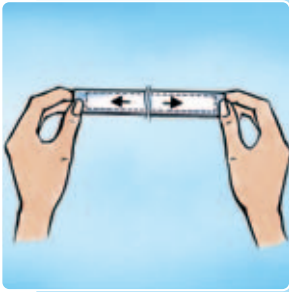

Schritt 2

- Strecken des Polstermaterials (beidseitig) zur Überdeckung der Schnittkanten

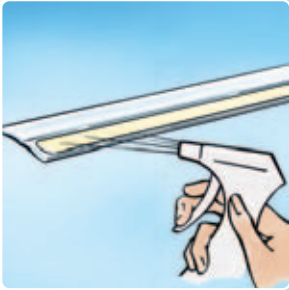

Schritt 3

Nach Öffnen der Polsterung:

- Schnittkanten (Enden) des Glasfaserkerns leicht abrunden
- Glasfaserkern einsprühen
- Verschließen der Polsterung



Schritt 4

- Schiene in einer 8er-Figur um den Daumen (in Höhe Daumensattelgelenk) und das Handgelenk herumführen



Schritt 5

- Anwickeln, anmodellieren und Stellungskorrektur

Fertig!

