

# Dynacast® Prelude Strap Kits

## Anlegen der Strap Kits Klettverschluss-Systeme

### Benötigtes Material

- **Dynacast® Prelude:**
  - Angepasste und vollständig ausgehärtete Dynacast® Prelude Schiene (siehe Schritt 1)
- **Dynacast® Prelude Strap Kits**  
(Abhängig von der Versorgung, Strap Kits für obere oder untere Extremität)



### Schritt 1

- Fertige Dynacast® Prelude Schiene anwickeln und anmodellieren
- Nach dem Aushärten der Schiene kann der zirkulär gewickelte Verband direkt oder indikationsspezifisch einige Tage später abgenommen werden



### Schritt 2

- Anschließend werden die Klettbänder mit dem Hakenband gegenläufig auf der Polsterung angebracht  
*(Danach sollten die Klettbänder von der Schiene nicht mehr entfernt werden)*



### Schritt 3

- Jetzt wird die Schiene wieder angepasst und die Klettbänder zirkulär geschlossen, indem sie auf sich selbst befestigt werden



### Schritt 4

#### WICHTIG:

- Bitte die Klettbänder immer nur auf sich selbst befestigen. Niemals auf der Polsterung der Schiene. Bitte weisen Sie auch Ihre Patienten darauf hin!