


Unterschenkelschiene

Posteriore

Unterschenkelschiene


Benötigtes Material

- **Dynacast® Prelude:**
 - Meterware 10 cm/**12,5 cm**/15 cm
 - Vorgeschnitten 12,5 x 65 cm/10 x 76 cm/12,5 x 76 cm
- Fixierbinde:
 - Elastomull haft/haft color: 10 cm/12 cm Breite
 - Idealbinde BSN/color: 10 cm/12 cm Breite
- Schere
- Maßband oder Mullbinde (unelastisch)
- 1 Paar unsterile Untersuchungshandschuhe (z. B. Glovex ultra vinyl)
- Sprühflasche mit Wasser (ca. 20 °C)

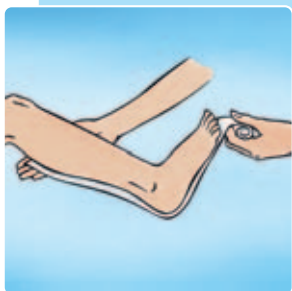

Schritt 1

- Gewünschte Länge von der Großzehenspitze bis ca. 1 Handbreit unter der Kniebeugefalte abmessen und von der Rolle abschneiden
(Folienverpackung wieder gut verschließen)

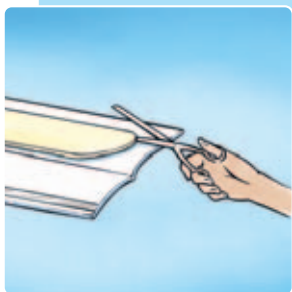

Schritt 2

- Handschuhe anlegen
- Öffnen der Polsterung entlang der Klebekante und Zuschneiden des Glasfaserkerns
Zehenbereich: *Zehen nachgeformt schneiden*
Oberes Schienende: *Glasfaser leicht abrunden*



Schritt 3

- Glasfaserkern einsprühen



Schritt 4

- Verschließen der Polsterung und an den Enden (Schnittkanten) ca. 1 cm überlappend zuschneiden



Schritt 5

- Schiene anlegen und seitlich im Fersenbereich umschlagen



Schritt 6

- Anwickeln, anmodellieren und Stellungskorrektur

Fertig!

